

Boletín técnico: Inseminación Artificial



Reproducción ®
Animal, S.A. de C.V.




LA PERICIA EN TÚ TÉCNICA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL ES PRIMORDIAL PARA EL BUEN “ÉXITO”, DEDICALE UNOS MINUTOS A ÉSTE BOLETÍN TÉCNICO.

Un buen comienzo en éste Enero 2009



1 Descongele el semen en agua tibia a una temperatura de 32 a 35° C por un mínimo de 40 segundos

Seque la pajilla y controle la identidad del toro antes de colocarla en el aplicador.

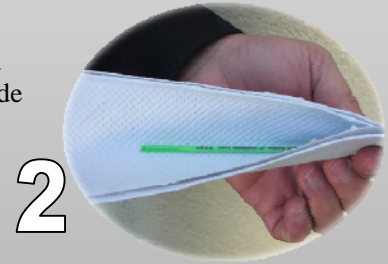

2



3

Entibie el aplicador antes de introducir la pajilla adentro.

Luego de cargar la pajilla en el aplicador, corte la pajilla debajo de su extremo sellado.



4



5

Coloque la funda sobre el aplicador cargado.

Coloque la camisa sanitaria o chemise



6

7



Coloque el aplicador cargado en un guante plástico limpio y dentro de su ropa para llevarlo a donde está la vaca, protegiéndolo contra los cambios bruscos de temperatura (shock por frío).

Sí tú tienes preguntas concernientes a la técnica de Inseminación Artificial, no dudes en contactarnos, llama sin costo al

018002287272

Sinceramente

*Reproducción Animal, S.A.
México*